

SPLINTLINE™ Acryl

Beabsichtigter Zweck

Die Herstellung von schnell aushärtenden temporären Kronen und Brücken, die bleiben weniger als 30 Tage im Mund. Die Anfertigung darf nur durch professionell geschultes Dentalpersonal erfolgen.

Weitere benötigte Geräte / Material

1. Silikon gleitmittel
2. Aquapres™ (Druckeinheit), optional
3. Acrylbohrer oder -stein
4. Jet™ Adjusters (Acrylfarbstoff), optional
5. Jet™ Seal (Acryldichtstoff), optional

Gebrauchsanweisung



Für gleichbleibende Ergebnisse die Flüssigkeit immer vor dem Gebrauch schütteln, da der Katalysator sich vom Monomer getrennt haben können.

1. Füllen Sie in der Abformung den/die extrahierten oder präparierten Zahn(e) wie folgt mit Splintline™: Befeuchten Sie die Oberfläche mit Splintline™ liquid. Sprühen Sie Splintline™ Pulver aus der Spenderflasche auf. Wechseln Sie Flüssigkeit und Pulver ab, bis die Abformung voll ist. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, beginnen und beenden Sie mit Flüssigkeit.
2. Während das Acryl eine pastenartige Konsistenz annimmt, den präparierten Zahn und das umliegende Gewebe mit silikon gleitmittel benetzen, um ein leichtes Entfernen des Acryl zu gewährleisten sowie die Zähne und umliegendes Gewebe zu schützen.
3. Den Abdruck in den Mund setzen und drei Minuten lang fixieren, bis das Material eine gummiartige Konsistenz annimmt. Lösen und überschüssiges Acryl entfernen. Nicht zu viel abschneiden.
4. Entfernen Sie das Splintline-Provisorium aus der Abformung und setzen Sie es wieder in den Mund des Patienten ein. Der Patient sollte 60 Sekunden lang in den Biss hineinbeißen. **VORSICHT!** Lassen Sie das Material nicht heiß werden im Mund!
5. Das Provisorium aus dem Mund des Patienten entfernen. Weitere 10 Minuten aushärten lassen, entweder auf der Arbeitsfläche oder, für ein besseres Endergebnis, im Aquapres™ bei 30 psi.
6. Passform überprüfen. Überschüssiges Material mit Acrylbohrer oder -stein entfernen. Für ein glattes Endergebnis schleifen.
7. Schattierung mit Jet™ Adjusters anpassen, falls erforderlich. Mit Jet™ Seal polieren.
8. Mögliche Reste von Silikongleitmittel von den Zähnen des Patienten entfernen. Provisorium in den Mund einsetzen und mit geeignetem provisorischem Zement befestigen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang

Enthält Ethylmethacrylat

Warnung! Entzündliche Flüssigkeit und Dampf. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten - Nicht rauchen.

Löst Hautirritationen aus. Kann allergische Hautreaktionen auslösen. Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Lagern Sie die Materialien im Originalbehälter, dicht verschlossen in aufrechter Position. An einem gut gelüfteten Ort lagern. Kühl aufbewahren.

Entsorgung

Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

Garantie

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt für ein Jahr nach Kaufdatum keine herstellungsbedingten Mängel aufweist nur durch autorisierte Wiederverkäufer. Keine Gewährleistung erfolgt, wenn das Produkt nicht für den angegebenen Zweck verwendet, nicht wie beschrieben angewendet oder nicht in der Originalverpackung aufbewahrt wird.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Dr
Wheeling, IL 60090 USA
www.langdental.com



MediMark® Europe
11 rue E. Zola
38100 Grenoble
Frankreich



Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

©2024 Lang Dental Mfg. Co., Inc. LANG, AQUAPRES, JET und SPLINTLINE sind Marke von Lang Dental Mfg. Co., Inc. Alle Rechte vorbehalten.

LDD 20G R. 0 2024-01