

# JET™ ACRYL

## Gebrauchsanweisung



Für gleichbleibende Ergebnisse die Flüssigkeit immer vor dem Gebrauch schütteln, da der Katalysator sich vom Monomer getrennt haben können.

## JET™ TOOTH SHADE

### Beabsichtigter Zweck

Die Herstellung von schnell aushärtenden temporären Kronen und Brücken, die bleiben weniger als 30 Tage im Mund. Die Anfertigung darf nur durch professionell geschultes Dentalpersonal erfolgen.

### Weitere benötigte Geräte / Material

1. Silikon gleitmittel
2. Jet™ Adjusters (Acrylfarbstoff), optional
3. Aquapres™ (Druckeinheit), optional
4. Jet™ Seal (Acryldichtstoff), optional
5. Acrylbohrer oder -stein

### Gebrauchsanweisung

1. Füllen Sie in der Abformung den/die extrahierten oder präparierten Zahn(e) wie folgt mit Jet™ Tooth Shade: Befeuchten Sie die Oberfläche mit Jet™ liquid. Sprühen Sie Jet™ Tooth Shade-Pulver aus der Spenderflasche auf. Wechseln Sie Flüssigkeit und Pulver ab, bis die Abformung voll ist. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, beginnen und beenden Sie mit Flüssigkeit.
2. Während das Acryl eine pastenartige Konsistenz annimmt, den präparierten Zahn und das umliegende Gewebe mit silikon gleitmittel benetzen, um ein leichtes Entfernen Acryl zu gewährleisten sowie die Zähne und umliegendes Gewebe zu schützen.
3. Legen Sie den Abdruck in den Mund und halten Sie ihn drei Minuten lang dort. Überschüssiges Acryl entfernen und abschneiden. Trimmen Sie nicht zu viel.
4. Führen Sie den Abdruck wieder in den Mund ein und bewegen Sie ihn in den Mund des Patienten hinein und wieder heraus bis das Material einen gummiartigen Zustand erreicht und sich nicht mehr verformen lässt. **Vorsicht!** Lassen Sie das Material nicht heiß werden im Mund!
5. Das Provisorium aus dem Mund des Patienten entfernen. Weitere 10 Minuten aushärten lassen, entweder auf der Arbeitsfläche oder, für ein besseres Endergebnis, im Aquapres™ bei 30 psi.
6. Entnehmen Sie das Provisorium dem Abdruck und überprüfen die Passform.
7. Überschüssiges Material mit Acrylbohrer oder -stein entfernen. Für ein glattes Endergebnis schleifen.
8. Schattierung mit Jet™ Adjusters anpassen, falls erforderlich. Mit Jet™ Seal polieren.
9. Mögliche Reste von Silikongleitmittel von den Zähnen des Patienten entfernen. Provisorium in den Mund einsetzen und mit geeignetem provisorischem Zement befestigen.

## JET XR™

### Beabsichtigter Zweck

Herstellung individueller röntgendichter Diagnoseschablonen und Stents. Die Anfertigung darf nur durch professionell geschultes Dentalpersonal erfolgen.

Schatten entspricht 1,0 mm Aluminium  
Undurchsichtig entspricht 1,8 mm Aluminium

## Gebrauchsanweisung

1. Mischen sie je nach Bedarfsmenge Sie 3 teile Jet XR™-Pulver und 1 teil Jet™ Liquid. Für eine weniger viskose Mischung mehr Flüssigkeit zugeben.
2. Verwenden Sie die Mischung für die gewünschte Anwendung. Die Abbindezeit beträgt 12-15 Minuten bei Zimmertemperatur, verlängert sich jedoch, wenn zusätzliche Flüssigkeit hinzugefügt wird.
3. Die gewünschte Röntgenopazität wird wie oben angegeben erreicht.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang

Enthält Methylmethacrylat

Gefahr! Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten - Nicht rauchen.

Lost Hautirritationen aus. Kann allergische Hautreaktionen auslösen. Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Lagern Sie die Materialien im Originalbehälter, dicht verschlossen in aufrechter Position. An einem gut gelüfteten Ort lagern. Kuhl aufbewahren

## Entsorgung

Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

## Garantie

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt für ein Jahr nach Kaufdatum keine herstellungsbedingten Mängel aufweist nur durch autorisierte Wiederverkäufer. Keine Gewährleistung erfolgt, wenn das Produkt nicht für den angegebenen Zweck verwendet, nicht wie beschrieben angewendet oder nicht in der Originalverpackung aufbewahrt wird.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.  
175 Messner Dr  
Wheeling, IL 60090 USA  
www.langdental.com



MediMark® Europe  
11 rue E. Zola  
38100 Grenoble  
Frankreich



Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

© 2024 Lang Dental Mfg. Co., Inc. LANG, AQUAPRES, JET und JET XR sind Marken von Lang Dental Mfg. Co., Inc. Alle Rechte vorbehalten.

LDD 14MG R. 0 2024-01